



MagnaPharm
One Team. One Solution.

Prezentare Produs Ededay (descriere pentru online)



MagnaPharm are plăcerea să vă informeze despre lansarea unui nou produs al producătorului internațional **NTC SRL**



Noul produs din **Portofoliul Oftalmologie MagnaPharm** aparține unui renumit producător specializat în produse din sfera oftalmologică, **NTC SRL**



Ededay®

Picături oftalmice, Ededay® cu rol în ameliorarea simptomelor edemului cornean

Datorită formulei sale inovatoare, Ededay® prezintă proprietăți mucoadezive: permite o aderență crescută la suprafața oculară și asigură hidratarea și protecția ochiului.

INDICAȚIE: Ededay® este o soluție oftalmică hipertonică sterilă, indicată pentru ameliorarea temporară a simptomelor asociate edemului cornean, cum ar fi tulburările de vedere și durerea.

Ededay®

- Prin conținutul de acid hialuronic în concentrație mare reduce disconfortul specific utilizării soluțiilor hipertone
- Datorită formulării asigură hidratarea, confortul și protecția suprafeței oculare

COMPOZIȚIE: Hialuronat de sodiu, acid boric, Kolliphor P407, trometamol, sorbitol, apă.

UTILIZARE: 1-2 picături la fiecare 3-4 ore sau conform indicațiilor medicului

Atenționări:

- A se folosi în termen de 8 săptămâni de la prima deschidere.
- Scoateți lentilele de contact înainte de a folosi Ededay®, pentru a evita deteriorarea suprafeței acestora. Așteptați cel puțin treizeci de minute înainte de a le purta din nou.
- Dacă mai folosiți și alte picături sau unguente oftalmice lăsați intervale de cel puțin treizeci de minute între aplicarea acestora.
- În timpul sarcinii și alăptării, consultați un medic înainte de a folosi Ededay®.
- Produsul a fost conceput pentru o utilizare continuă pe o perioadă de cel mult șapte zile consecutive; dacă simptomele dvs. nu se ameliorează, consultați un medic*



MagnaPharm
One Team. One Solution



Dispozitiv medical din Clasa IIa

Formă farmaceutică:

Soluție oftalmică hipertonică sterilă
Flacon de 10 ml, fără conservanți



*Prospect Ededay



MagnaPharm
One Team. One Solution.